

## KVALITETSSÄKRADE DROGTESTER-HÄLSO OCH SJUKVÅRD INSTRUKTIONER FÖR PROVTAGNING I URIN

### Före provtagning:

- Delge provlämnaren regler för provtagningen.
- Fyll i remissen med begärd information. Alternativt kan en elektronisk beställning göras.
- Kontrollera identiteten hos provlämnaren (körkort, ID-kort, pass etc.) och markera i ruta för provtagarens signatur.
- Väljs kod som provlämnarens ID/Namn rekommenderas remissnumret.
- Ytterkläder och väskor får ej tas med in i provtagningsutrymmet.
- Provlämnaren skall tvätta händerna utanför toaletten före provtagningen
- Provlämnaren får ej dricka före provtagningen.

### Provtagning:

- Provlämningen skall vara övervakad.
- Förse provlämnaren med en ren plastmugg som märks med dennes identitet.
- Spolning av toalett eller handfat får ej ske i samband med provtagningen.

### Provhantering:

- Provhanteringen skall ske i provlämnarens närvaro.
- Fyll ett plaströr med urin ca 8-10 ml, försegla med sigill från remissen. Elektronisk beställning förseglas ej.
- Lägg det förseglade provröret i absorbfickan. Lägg absorbfickan i provpåsen. Placera provpåsen och ifylld remiss i en adresserad och förfrankerad transportförpackning för inskick av prov till Unilabs Eskilstuna.

För mer information kontakta Unilabs kundtjänst tel: 0771-40 77 40  
E-post: kundtjanst@unilabs.com