

Datum 2023-12-14

# Meddelande 9b/2023

Från Unilabs Laboratoriemedicin, Stockholm

**Till Capio S:t Görans Sjukhus**

## Fecesrör med sked ska användas!

Omedelbar övergång till fecesrör med sked för mikrobiologiska PCR analyserna:

- Fecespanel-Virus
- Parasit DNA cystor
- Clostridioides difficile toxingen DNA
- Fecespanel-Bakterier
- Gastroenteritpanel

**Provtagningsrör med sked för fecesprover utan tillsats**



- Avföringen samlas i rent kärl eller på papper i toalettstolen.
- Tag 2-3 skedar fast eller 2 mL flytande feces i provtagningsröret.
- Skruva på korken ordentligt.

Förändringen orsakas av tekniska anledningar som står utanför labbets kontroll. Vi beklagar den snabbtillkomna förändringen.

Provetiketter som skrivs ut vid elektronisk beställning av dessa analyser kommer fortfarande att hänvisa till rosa eSwab tills nästa katalogsläpp. Bortse ifrån det och använd fecesrör med sked.

Michael Toepfer, Spec.läkare, [michael.toepfer@unilabs.com](mailto:michael.toepfer@unilabs.com)