

## Instruktion för provtagning med Quantisal salivprovtagningsskit -Arbetsplats

**Material:** Quantisal provtagningsskit 2 st, plastpåse, absorbent, ytterförpackning.

**Remiss:** Kvalitetssäkrade drogtester- Arbetsplats.

### Före provtagning:

Kontrollera provlämnarens identitet och delge provlämnaren regler för syftet med drogtestet och vilka analyser som skall utföras

Fyll i remiss med begärd information.

Notera ev intag av läkemedel de senaste två veckorna.

Be provlämnaren att tömma munnen på matrester, tuggummi, tobak eller liknande.

Om munnen ej är ren skall den sköljas med vatten och vänta med provtagningen minst 10 minuter.

### Provtagning:

Be provlämnaren att samla/ hålla saliv i munnen. Provlämnaren kan sitta något framåtlutat och röra tungan från sida till sida för att ackumulera saliv.

Om så önskas, låt provlämnaren välja provtagningsskit

Kontrollera utgångsdatum på förpackningen och öppna den.

Be provlämnaren att öppna förpackningen med provtagningsspinnen, vidrör ej uppsugningsdelen.

Be provlämnaren placera uppsugningsdelen under tungan och stäng munnen.

OBS! provlämnaren får inte tugga, prata eller ta ut provtagningsspinnen förrän indikatorfältet blir blått. Indikatoromslag bör ske inom 10 minuter.

Öppna det bifogade röret med buffert.

Be provlämnaren att **stoppa ned hela provtagningsspinnen**, sätt på den röda proppen.

Plombera röret med etikett A från remissen.

Upprepa provtagningsförfarandet till ytterligare ett prov. Plombera med etikett B.

### Efter provtagning:

Kontrollera att rätt analyser är beställda, detta kan inte ändras efter inskick till laboratoriet!


Provlämnaren tar del av texten vid "Provlämnarens samtycke" och skriver under på avsett ställe.

Provtagaren intygar att provet är taget enligt företagets instruktioner och att provlämnaren har lämnat skriftligt samtycke genom att skriva under på remissen på avsett ställe. **OBS!** Analys utförs ej om provtagarens försäkran saknas.

Provtagaren lämnar avsedd kopia till provlämnaren och behåller provtagarens kopia.

Laboratoriets del av remissen och de två plomberade rören packas.

Använd absorbent och plastpåse, förslut med sigill och lägg i ytterförpackning tex vår förfrankerade, föradresserade transportkartong.

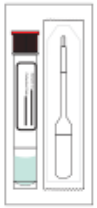

Provtagningskitet innehåller:

Ett rör med blåfärgad buffert.

En uppsamlingspinne (samlar 1 mL ± 10% saliv) med indikatorfält som blir blått vid adekvat mängd uppsamlad saliv.

För arbetsplatsprov behövs två kit.