

Instruktion för provtagning med Quantisal salivprovtagningsskit -Arbetsplats

Denna instruktion beskriver provtagning med Quantisal singel-kit. För att samla saliv till både A- och B-prov används två Quantisal – kit med två provtagningstillfällen direkt efter varandra.

Det går även bra att använda ett Quantisal II - kit för samma ändamål. Quantisal II bygger på en dubbel provtagning, vilket innebär att man kan samla saliv till både A- och B-prov vid ett och samma provtagningstillfälle med endast ett testkit. Välj då instruktion för provtagning med Quantisal II.

Material: Quantisal provtagningsskit 2st, plastpåse, absorbent, ytterförpackning.

Remiss: Kvalitetssäkrade drogtester- Arbetsplats.

Före provtagning:

Kontrollera provlämnarens identitet och delge provlämnaren regler för syftet med drogtestet och vilka analyser som skall utföras

Fyll i remiss med begärd information.

Notera ev intag av läkemedel de senaste två veckorna.

Be provlämnaren att tömma munnen på matrester, tuggummi, tobak eller liknande.

Om munnen ej är ren skall den sköljas med vatten och vänta med provtagningen minst 10 minuter.

Tvätta händerna med vatten.

Provtagning:

Be provlämnaren att samla/ hålla saliv i munnen. Provlämnaren kan sitta något framåtlutad och röra tungan från sida till sida för att ackumulera saliv.

Om så önskas, låt provlämnaren välja provtagningsskit

Kontrollera utgångsdatum på förpackningen och öppna den.

Be provlämnaren att öppna förpackningen med provtagningsspinnen, vidrör ej uppsugningsdelen.

Be provlämnaren placera uppsugningsdelen under tungan och stäng munnen.

OBS! provlämnaren får inte tugga, prata eller ta ut provtagningsspinnen förrän indikatorfältet blir blått. Indikatoromslag bör ske inom 10 minuter.

Öppna det bifogade röret med buffert.

Be provlämnaren att **stoppa ned hela provtagningsspinnen**, sätt på den röda proppen.

Plombera röret med etikett A från remissen.

Upprepa provtagningsförfarandet till ytterligare ett prov. Plombera med etikett B.

Vill provlämnaren ha hjälp vid provtagningen går det bra att provtagaren hjälper till med att öppna provtagningsskittet, att placera provtagningsspinnen under provlämnarens tunga, ta ut provpinnen samt att placera pinnen i buffertröret.

Efter provtagning:


Kontrollera att rätt analyser är beställda, detta kan inte ändras efter inskick till laboratoriet!

Provlämnaren tar del av texten vid "Provlämnarens samtycke" och skriver under på avsett ställe.

Provtagaren intygar att provet är taget enligt företagets instruktioner och att provlämnaren har lämnat skriftligt samtycke genom att skriva under på remissen på avsett ställe. **OBS!** Analys utförs ej om provtagarens försäkran saknas.

Provtagaren lämnar avsedd kopia till provlämnaren och behåller provtagarens kopia. Laboratoriets del av remissen och de två plomberade rören packas.

Använd absorbent och plastpåse, förslut med sigill och lägg i ytterförpackning tex vår förfrankerade, föradresserade transportkartong.

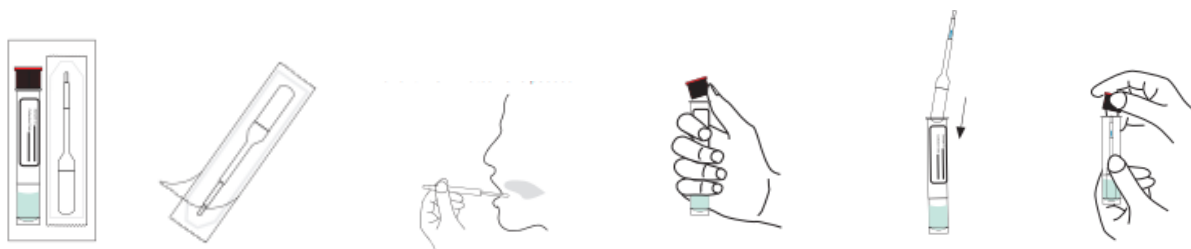

Provtagningskitet innehåller:

Ett rör med blåfärgad buffert.
(För arbetsplatsprov behövs två kit).

En uppsamlingspinne med cellulosadyna som samlar
1 ml $\pm$ 10% saliv.

Blå färg syns i uppsamlingsenhetens indikatorfält på skaftet när
tillräcklig mängd/volym har samlats. Dubbelkolla att fältet blivit
helt blått innan uppsamlingen avslutas.