

Instruktion för provtagning med Quantisal salivprovtagningsskit -Hälsa och sjukvård

Material: Quantisal provtagningsskit, plastpåse, absorbent, ytterförpackning.

Remiss: Kvalitetssäkrade drogtester- Hälsa och sjukvård.

Alternativt elektronisk beställning.

Före provtagning:

Kontrollera provlämnarens identitet och delge provlämnaren regler för syftet med drogtestet och vilka analyser som skall utföras

Fyll i remiss med begärd information alternativt gör en elektronisk beställning.

Be provlämnaren att tömma munnen på matrester, tuggummi, tobak eller liknande.

Om munnen ej är ren skall den sköljas med vatten och vänta med provtagningen minst 10 minuter.

Provtagning:

Be provlämnaren att samla/ hålla saliv i munnen. Provlämnaren kan sitta något framåtlutat och röra tungan från sida till sida för att ackumulera saliv.

Kontrollera utgångsdatum på förpackningen och öppna den.

Be provlämnaren att öppna förpackningen med provtagningsspinnen, vidrör ej uppsugningsdelen.

Be provlämnaren att placera uppsugningsdelen under tungan och stäng munnen.

OBS! provlämnaren får inte tugga, prata eller ta ut provtagningsspinnen förrän indikatorfältet blir blått. Indikatoromslag bör ske inom 10 minuter.


Öppna det bifogade röret med buffert.

Be provlämnaren att **stoppa ned hela provtagningsspinnen**, sätt på den röda proppen.

Märk röret med etikett.

Efter provtagning:

Packa provet och ev pappersremiss i plastpåse, absorbent och lägg i ytterförpackning tex vår förfrankerade, föradresserade transportkartong.

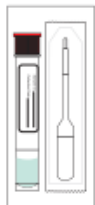



Provtagningskitet innehåller:

Ett rör med blåfärgad buffert.

En uppsamlingspinne (samlar 1 mL ± 10% saliv) med indikatorfält som blir blått vid adekvat mängd uppsamlad saliv.