

Instruktion för provtagning med Quantisal II salivprovtagningsskit -Arbetsplats

Denna instruktion beskriver provtagning med Quantisal II. Quantisal II bygger på en dubbel provtagning, vilket innebär att man kan samla saliv till både A- och B-prov vid ett och samma provtagningstillfälle med endast ett testkit.

Det går även bra att använda två Quantisal singel-kit för samma ändamål men då blir det två provtagningstillfällen direkt efter varandra. Välj då instruktion för provtagning med Quantisal.

Material: Quantisal II provtagningsskit innehållande dubbel-pinne och två rör. Även absorberent och plastpåse/ ytterförpackning behövs för skick av provet till Lab.

Remiss: Kvalitetssäkrade drogtester- Arbetsplats.

Före provtagning:

Kontrollera provlämnarens identitet och delge provlämnaren regler för syftet med drogtestet och vilka analyser som skall utföras.

Fyll i remiss med begärd information.

Notera ev. intag av läkemedel de senaste två veckorna.

Be provlämnaren att tömma munnen på matrester, tuggummi, tobak eller liknande.

Om munnen ej är ren skall den sköljas med vatten och vänta med provtagningen minst 10 minuter.

Tvätta händerna med vatten.

Provtagning:

Be provlämnaren att samla/ hålla saliv i munnen. Provlämnaren kan sitta något framåtlutad och röra tungan från sida till sida för att ackumulera saliv.

Om så önskas, låt provlämnaren välja provtagningsskit

Kontrollera utgångsdatum på förpackningen och öppna den.

Be provlämnaren att öppna förpackningen med provtagningsspinnen, vidrör ej uppsugningsdelen.

Be provlämnaren placera uppsugningsdelen under tungan och stäng munnen.

OBS! provlämnaren får inte tugga, prata eller ta ut provtagningsspinnen förrän indikatorfältet blir blått. Indikatoromslag bör ske inom 10 minuter.

Öppna de bifogade rören med buffert.

Dela pinnen i två delar.

Be provlämnaren att **stoppa ned hela provtagningsspinnarna** i varsitt rör, sätt på de röda propparna.

Plombera ett av rören med etikett A från remissen och det andra röret med etikett B från samma remiss.

Vill provlämnaren ha hjälp vid provtagningen går det bra att provtagaren hjälper till med att öppna provtagningsskittet, att placera provtagningsspinnen under provlämnarens tunga, ta ut provpinnen samt att placera pinnen i buffertröret.

Efter provtagning:


Kontrollera att rätt analyser är beställda, detta kan inte ändras efter att provet skickats till laboratoriet!

Provlämnaren tar del av texten vid "Provlämnarens samtycke" och skriver under på avsett ställe.

Provtagaren intygar att provet är taget enligt företagets instruktioner och att provlämnaren har lämnat skriftligt samtycke genom att skriva under på remissen på avsett ställe. **OBS!** Analys utförs ej om provtagarens försäkran saknas.

Provtagaren lämnar avsedd kopia till provlämnaren och behåller provtagarens kopia. Laboratoriets del av remissen och de två plomberade rören packas.

Använd absorbent och plastpåse, förslut med sigill och lägg i ytterförpackning tex vår förfrankerade, föradresserade transportkartong.

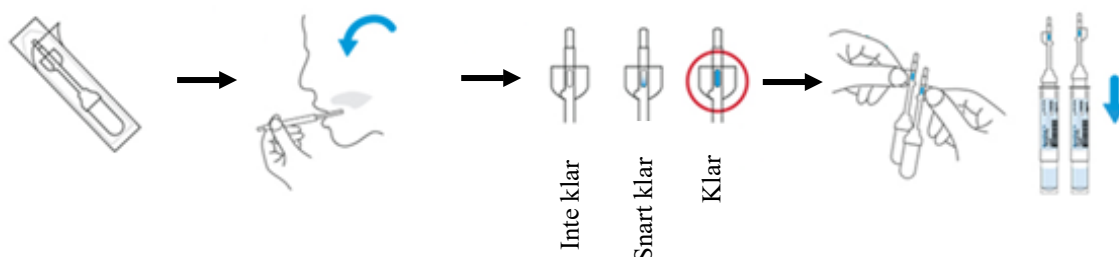

Provtagningskitet innehåller:

Två rör med blåfärgad buffert.

En tvådelad uppsamlingspinne med två cellulosadynor som samlar 1 ml $\pm$ 10% saliv vardera.

Blå färg syns i uppsamlingsenhetens indikatorfält på skaftet när tillräcklig mängd/volym har samlats. Dubbelkolla att fälten på båda sidorna om stickan blivit helt blå innan uppsamlingen avslutas.