

Pinnprovtagning i slidan: Aptima[®] Multitest Swab Specimen Collection Kit


Snabbguide för patienten

Om du har några frågor angående detta förfarande ska du vända dig till din läkare, sjuksköterska eller vårdgivare.

Tvätta händerna innan du börjar.




Öppna och dra delvis av provtagningspinnens förpackning och ta ut provtagningspinnen. Vidrör inte den mjuka spetsen och lägg inte ned provtagningspinnen. **Om den mjuka spetsen vidrörs, läggs ned eller tappas ska du be om ett nytt Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit.** Håll i provtagningspinnen genom att placera tummen och pekfingeret mitt på provtagningspinnens skaft över den svarta brytskåran.

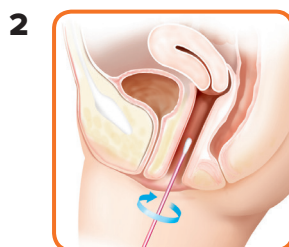

För försiktigt in provtagningspinnen i öppningen i slidan, cirka fem cm (två tum), och vrid runt provtagningspinnen varsamt i 10 till 30 sekunder. Se till att provtagningspinnen vidrör slidväggarna så att provtagningspinnen suger upp fukt. Ta sedan ut provpinnen utan att vidröra huden.



Håll fast provtagningspinnen och skruva samtidigt av korken på röret med handen. Spill inte ut innehållet i röret. **Om innehållet i röret spills ut ska du be om ett nytt Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit.** Placera omedelbart provtagningspinnen i transportröret så att den svarta brytskåran befinner sig överst i röret. Bryt försiktigt av provtagningspinnens skaft vid brytskåran mot rörets ovansida. Provtagningspinnen sjunker ned till botten av behållaren. Kassera den övre delen av provtagningspinnens skaft.

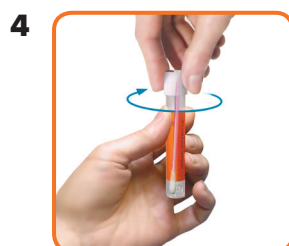

Skruva på korken ordentligt på röret.
Returnera röret enligt vårdgivarens instruktioner.