

## **KVALITETSSÄKRADE DROGTESTER-HÄLSO OCH SJUKVÅRD INSTRUKTIONER FÖR PROVTAGNING I URIN**

### **Före provtagning:**

- Delge provlämnaren regler för provtagningen.
- Fyll i remissen med begärd information.
- Kontrollera identiteten hos provlämnaren (körkort, ID-kort, pass etc.) och markera i ruta för provtagarens signatur.
- Väljs kod som provlämnarens ID/Namn rekommenderas remissnumret.
- Ytterkläder och väskor får ej tas med in i provtagningsutrymmet.
- Provlämnaren skall tvätta händerna före provtagning.
- Provlämnaren får ej dricka före provtagningen.

### **Provtagning:**

- Spolning av toalett eller handfat får ej ske i samband med provtagningen.
- Provlämningen skall vara övervakad.

### **Provhantering:**

- Provhanteringen skall ske i provlämnarens närvaro.
- Fyll ett rör med 8 – 10 mL urin, försegla med sigill märkt urin.
- Lägg det förseglade provröret i en transporthylsa. Placera prov och ifylld remiss i en adresserad och förfrankerad transportförpackning för inskick av prov till Unilabs Eskilstuna.

För mer information kontakta Unilabs kundtjänst tel: 0771-40 77 40

E-post: [kundtjanst@unilabs.com](mailto:kundtjanst@unilabs.com)