

## **KVALITETSSÄKRADE DROGTESTER-HÄLSO OCH SJUKVÅRD INSTRUKTIONER FÖR PROVTAGNING SALIVTEST**

### **Material:**

Oral-Eze provtagningskit, plastpåse, remiss, transportförpackning

### **Före provtagning:**

- Delge provlämnaren regler för provtagningen.
- Fyll i remissen med begärd information.
- Kontrollera identiteten hos provlämnaren (körkort, ID-kort, pass etc.) och markera i ruta för provtagarens signatur.
- Be provlämnaren att tömma munnen på matrester, tuggummi, tobak eller liknande. Om munnen ej är ren skall den sköljas med vatten och vänta med provtagning minst 10 minuter.

### **Provtagning:**

Be provlämnaren att samla/hålla saliv i munnen.

- Kontrollera utgångsdatum på kitet. Oral-Eze®  
Provförpackning öppnas i provlämnarens närvaro
- Ta ut spateln ur förpackningen, ta i plasthandtaget- var noga med att ej vidröra uppsugningsdelen.
- Placera uppsugningsdelen mellan nedre tandrad och kind, med den filtbeklädda delen mot tandraden.
- Ta ur spateln ur munnen när indikatorfältet är blått. Öppna behållaren med buffert och håll den upprätt.  
Placera uppsugningsdelen i behållaren och lösgör den genom att trycka på den räfflade delen av handtaget.
- Stäng locket till behållaren. Sätt på sigill märkt Saliv.

### **Efter provtagning:**

- Markera indikatoromslag i ruta på remissen.
- Lägg det förseglade provröret i plastfickans ficka med absorbent. Den ifyllda remissen viks så få gånger som möjligt och läggs i den större fickan.
- Förslut plastfickan och lägg den i transportförpackningen.
- Skicka den föradresserade och förfrankerade transportförpackningen till Unilabs Eskilstuna.

