



Datum 2021-10-06

# Driftmeddelande

## Från Unilabs Laboriemedicin, Västra Götaland

### Leveransproblem Li-Heparinrör med gel (ljusgrön kork)

Vid leveransproblem av rör ska i första hand rör med samma tillsats från andra leverantörer användas.

I andra hand kan rör med samma tillsats men utan gel användas (Li-Heparinrör utan gel).

Detta medför att rören vid transport och förvaring över 2 timmar ska centrifugeras och hällas över i ett avhållningsrör.

Serumrör kan inte användas istället för Li-Heparinrör, då inte alla analyser kan utföras i serumrör samt att patientresultaten kan skilja sig.

För att få tillförlitliga patientresultat är det ytterst viktigt att rätt rörtyp används.

Har ni brist på rätt rörtyp kontakta Kundtjänst så kan vi hjälpa er att reda ut vilka alternativ som finns för eran verksamhet.

Barbara Usener, Medicinsk Chef Unilabs Laboriemedicin