

Datum 2025-05-15

Meddelande 3a/2025

Från Unilabs Laboratoriemedicin, Stockholm

Till Unilabs privatkunder

(Vårdgivare, som har avtal med Region Stockholm, åläggs att själva kontrollera vad/vilka analyser som är avtalade för sin verksamhet).

För mer information om våra analyser - se www.anvisningar.se
Uppdaterade eller nya anvisningar finns tillgängliga senast fr.o.m. start-/justeringsdatum.

Förändrade rutiner för hållbarhet och provhantering av APTT fr om 2025-06-02

Förvaring av avhållt plasma

- Avhållt plasma kan förvaras kylt (2–8°C) och är då hållbar i upp till 12 timmar.
- För heparinbehandlade patienter är hållbarheten endast 1 timme i rumstemperatur.

Vid längre förvaring av prover från VC

Om prover behöver förvaras längre än ovan angiven tid ska följande rutiner följas:

- Centrifugera provet omedelbart i 15 minuter vid 2000xg.
- Överför plasman försiktigt till ett avhållningsrör för serum/plasma. Lämna alltid minst 0,5 cm plasma ovanför blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter.
- Frys plasman omedelbart vid -20°C och skicka provet fryst.

Observera: Dubbelcentrifugering av prover innan frysning ska inte längre utföras.

Kristina Sejersen, specialistläkare, Klinisk kemi

Eli Zahou, specialistläkare, Klinisk kemi