

SÖR - Provtransport med Rörpost, gäller Mälarsjukhuset och Nyköpings lasarett

RÖD & GRÖN PATRON



Vad ska sändas i RÖD & GRÖN insatspatron:

Prover beställda med elektronisk remiss

- Litiumheparinrör (grön kork)
- Citratrör (ljusblå kork)
- EDTA rör (lila kork)
- Fluorid-citratrör (rosa/grå)
- Natriumheparinrör (mörkblå kork)
- Serumrör utan gel (röd kork)
- Serumrör med gel (gul kork)
- Hylsa innehållande: blodgasspruta, urinrör (endast i grön patron)



BLÅ PATRON



Vad ska sändas i **BLÅ** insatspatron:

Prover beställda med pappersremiss (remiss ska skickas med)

- Kapillära provtagningsrör
- Sänkarör (svart propp) transporteras i hylsa
- Sterila plaströr med skruvlock för urin
- Odlingrör, urinerör, eSwab ex Sårodling
- Molekylärbiologiska analyser ex Covid, Luftvägspanel
- Blododlingsflaskor, **maximalt 2 st i en patron** (maxvikt för patron)



OBSERVERA: Packa proverna i avsedda plastfickor, inga lösa prover/remisser får finnas.

Plastfickan rullas ihop och försluts med ett gummiband.

OBS! Endast 1 plastficka per patron.



Prover som **INTE** får sändas i rörposten
MÅSTE lämnas i luckan på Unilabs provinlämning.

- Likvor
- Kapillära glasrör, tex blodgas
 - Prov på is
 - Vävnadsprover
- Kapillära prover, PK analys