

Provtransport med Rörpost till Unilabs på Kullbergsska sjukhuset

LILA PATRON

Lila patroner har insatser för att skicka provrör och blododlingsflaskor för automatisk hantering på Kemlab.

Provrören trycks ner i de **små** hålen – var noga med att trycka ner rören i insatsen så att det känns att de sitter fast.

När två provrör placeras i samma hål, tryck in dem åt samma håll.

Blododlingsflaska trycks ner i det stora hålet.

Blodgasspruta måste läggas i en hylsa och tryckas ner i det stora hålet.

Endast dessa provrör och blododlingsflaskor får packas i lila patron - **ingenting annat!**



RÖD PATRON

I röd patron skickas övriga provrör. Dessa packas i avsedda plastfickor – var noga med att rulla ihop och sätt gummiband runt, lika bilden nedan.



1. Placera provrören i avsedda fickor



2. Vik in den stora fliken över provrören.



3. Lägg remiss i fickan. Rulla ihop och trä gummiband runt.

