

## **SÖR Information angående provtransport med rörpost**

Gäller: Klinisk kemi och mikrobiologi

### **Rörpost, provhantering:**

Rörposten är framförallt till för akuta prover.

Den som packar provet har ansvar för att provkärlet är rätt packat och inte läcker ut under transporten.

Prov och remiss som skickas i rörpost ska överensstämma.

Provkärl läggs i en bubbelplastpåse, överfyll inte påsen.

Används rörpost-tuber med "insatser" stoppas provröret i avsett hål i insatsen.

Om rörposten används för transport av läkemedel eller dylikt, packa i ren plastpåse.

|                                           |                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Venösa blodprover</b>                  | <b>Bubbelplast eller transporthylsa</b> |
| <b>Kapillära blodprover</b>               | <b>Transporthylsa</b>                   |
| <b>Blodgaser</b>                          | <b>Transporthylsa</b>                   |
| <b>Odlingsprover eswab</b>                | <b>Transporthylsa</b>                   |
| <b>Blododlingar (skickas två och två)</b> | <b>Plastpåse</b>                        |
| <b>Urinprover</b>                         | <b>Transporthylsa</b>                   |

### **Prover som inte ska skickas med rörpost:**

Cerebrospinalvätska

Prov på is

Vävnadsprover

### **Artikelnummer på Varuförsörjningen:**

Bubbelplast artnr: 46975

Transporthylsa artnr: 41030

Bubbelplastpåsen och transporthylsan är flergångsartiklar.

### **Problem med rörpost:**

Anmäl snarast till Regionservice; 016-103200 och meddela Lab; 016-104680

## SÖR Information angående provtransport med rörpost

